

BAUSCH + LOMB

Renu® solução multiuso

sensitive

INSTRUÇÕES DE USO: Para desinfecção e limpeza adequadas, os seguintes passos devem ser seguidos:

1° Passo: Coloque no mínimo 3 gotas de **renu® sensitive solução multiuso** de cada lado da superfície da lente de contato e fricção por 20 segundos.

Não é necessário o uso de limpador diário.

2° Passo: Remova os resíduos da superfície das lentes, enxaguando-as completamente com **renu® sensitive solução multiuso**.

3° Passo: Coloque as lentes limpas no estojo para lentes e preencha-o com **renu® sensitive solução multiuso**. Deixe as lentes imersas na solução por no mínimo 4 horas. Lembre-se sempre de utilizar solução fresca.

Nunca reutilize a solução.

Agora suas lentes estão prontas para o uso. Nenhuma solução salina é necessária para o enxágue. Se algum resíduo permanecer na lente, antes de colocá-la, lave-a com **renu® sensitive solução multiuso**.

ARMAZENAMENTO: Você pode armazenar suas lentes em um estojo fechado por no máximo 30 dias até o uso, desde que troque a solução semanalmente. Armazenar a solução em temperatura ambiente de até 25°C.

PARA REMOVER PROTEÍNAS DE SUAS LENTES DE CONTATO:

A especial combinação de **renu® sensitive solução multiuso** com Renu® 1 Step removedor diário de proteínas da Bausch + Lomb é um simples e conveniente meio para remover eficientemente depósitos de proteínas de suas lentes de contato no dia-a-dia. Renu® 1 Step removedor diário de proteínas é especialmente formulado para uso diário, para limpeza enzimática e desinfecção simultâneas de suas lentes cada vez que você as mergulhar em **renu® sensitive solução multiuso**.

Siga as instruções de uso do produto e as instruções fornecidas pelo seu oftalmologista. Nota: O cuidado apropriado das lentes requer a remoção de depósitos de proteínas das mesmas.

COMPOSIÇÃO: **renu® sensitive solução multiuso** é uma solução isotônica estéril que contém ácido bórico, edetato dissódico, poloxamina sódica, borato de sódio e cloreto de sódio; preservada com DYMED™ (poliaminopropil biguanida) 0,00005%.

AÇÃO: **renu® sensitive solução multiuso** limpa, desprende e remove acúmulos de depósitos e resíduos das lentes de contato gelatinosas. Extermina microrganismos da superfície das lentes. Enxágua, armazena e mantém a umidade das lentes antes do uso. Para o uso em combinação com Renu® 1 Step removedor diário de proteínas.

INDICAÇÃO: **renu® sensitive solução multiuso** é indicado para limpeza diária, remoção de proteínas quando utilizado com Renu® 1 Step removedor diário de proteínas, enxágue e armazenagem de lentes de contato gelatinosas de uso diário e de uso prolongado, e desinfecção química (sem aquecimento), conforme recomendado por seu oftalmologista.

CONTRAINDICAÇÃO: O produto é contraindicado para pessoas sensíveis aos componentes de sua fórmula.

ADVERTÊNCIAS: Problemas com as lentes de contato e com o estojo das lentes podem resultar em sérios danos ao olho. Problemas oculares, incluindo úlceras na córnea, podem se desenvolver rapidamente e levar à perda da visão. Lentes de uso diário não são indicadas para o uso durante a noite e não devem ser usadas durante o sono. Estudos clínicos têm demonstrado que o risco de reações adversas graves é maior quando essas lentes são usadas durante a noite. Lentes de uso prolongado devem ser removidas periodicamente para limpeza e desinfecção ou para eliminação e substituição, conforme prescrito pelo seu oftalmologista. Estudos clínicos têm demonstrado que existe um aumento da incidência de reações adversas sérias em usuários de lentes de contato de uso prolongado em relação aos usuários de lentes de contato de uso diário. Estudos também têm mostrado que o risco de reações adversas graves aumenta com o tempo em que as lentes de uso prolongado são usadas antes da remoção para limpeza e desinfecção ou eliminação e substituição. Estudos também têm mostrado que os fumantes têm uma maior incidência de reações adversas. Se sentir desconforto ocular, lacrimejamento excessivo, alterações na visão, vermelhidão dos olhos, remova imediatamente as lentes e procure o seu oftalmologista. É recomendado aos usuários de lentes de contato consultar um oftalmologista duas vezes por ano, ou mais, conforme necessidade.

• Para evitar contaminação, não toque a ponta do frasco em qualquer superfície. Recoloque a tampa após o uso.

• Não utilize desinfecção por aquecimento (térmica)

O estojo das lentes deve ser preenchido com solução fresca cada vez que você armazenar suas lentes, e nunca preenchido até transbordar ou com solução reutilizada. Você deve descartar a solução imediatamente após retirar as lentes do estojo. Não armazenar ou expor suas lentes, não lavar o estojo de lentes com água da torneira, engarrafada ou destilada, ou com qualquer solução não-estéril. Lave e enxágue o estojo de lentes e deixe secar sob ar fresco toda vez que remover as lentes. Para facilitar a secagem, você pode virar seu estojo de lentes durante a secagem, evitando o acúmulo de solução. Substitua seu estojo de lentes frequentemente, conforme recomendado. Descartar a solução do estojo das lentes após cada utilização e não utilizar água ou soro fisiológico para limpar suas lentes. Caso contrário poderá ocorrer contaminação, resultando em injúria ocular e potencial perda da visão.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA SEGURANÇA:

• Siga sempre as instruções de uso do produto. Falha ao seguir as instruções de uso do produto pode levar à perda da visão. • Visite seu oftalmologista regularmente.

• Sempre lave e seque as mãos antes de manusear as lentes. • Não utilize água da torneira, água engarrafada ou saliva com as lentes ou estojo de lentes. • Utilizar somente a solução fresca para limpar e desinfetar as lentes de contato. • Sempre descartar qualquer solução remanescente no estojo das lentes após cada ciclo de desinfecção. • Solução salina não desinfeta suas lentes. • Substitua sempre as suas soluções, lentes e estojo de lentes conforme recomendado. • Para evitar contaminação, não toque na ponta do frasco em qualquer superfície. Recoloque a tampa após o uso. • Não use calor (energia térmica) para desinfecção.

PRECAUÇÕES:

• Sempre descarte a solução após cada uso. • Feche bem a embalagem após o uso.

• Usar antes da data de validade impressa no cartucho e no frasco. • Descartar a solução 90 dias após a abertura do frasco.

• Manter fora do alcance das crianças.

• Armazenar a solução em temperatura ambiente de até 25°C.

REAÇÕES ADVERSAS: Os seguintes problemas podem ocorrer: dor aguda no olho, coceira ou queimação (irritação), conforto menor do que quando a lente foi utilizada pela primeira vez, sensação de algo no olho (corpo estranho, área riscada), umidade excessiva (lacrimejamento) dos olhos, secreções oculares anormais, vermelhidão, redução da nitidez da visão (pobre acuidade visual), visão borrada, halos ou arco-íris em torno dos objetos, sensibilidade à luz (fotofobia), ou olhos secos. Caso apresente algum dos sintomas descritos acima, remova imediatamente suas lentes.

• Caso o desconforto ou problema apresentado parar, observe de perto as lentes.

• Caso as lentes, de alguma forma apresentem algum dano, não as coloque novamente nos olhos. Guarde-as no estojo e procure seu oftalmologista.

• Caso a lente esteja suja, apresente um cílio ou outro corpo estranho, ou se o problema parar e a lente aparentar estar intacta, limpe-a completamente, lave-a e desinfete-a, e então recoloque-a.

• Se o problema continuar, remova imediatamente as lentes e consulte seu oftalmologista. Se qualquer um dos sintomas acima ocorrer, uma séria condição pode estar presente, como uma infecção, úlcera de córnea, neovascularização ou irite. Procure imediatamente seu oftalmologista para identificação do problema, iniciando o tratamento a fim de evitar sérios danos ao olho.

CUIDADOS BÁSICOS COM AS LENTES DE CONTATO:

• Sempre lave e enxágue as mãos antes de manipular suas lentes. • Limpe, lave e desinfete suas lentes toda vez que as remover. • Sempre manipule as lentes na mesma ordem, direita ou esquerda primeiramente, para evitar mistura. • Após o uso, sempre descarte a solução do estojo e lave com **renu® sensitive solução multiuso**, deixando secar em seguida. • Substitua o estojo das lentes mensalmente.

ESTÉRIL - Esterilizado por Filtração

®/™ indicam marcas registradas da Bausch & Lomb Incorporated ou de suas afiliadas.

© Bausch & Lomb Incorporated

Fabricante legal: Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609 - Estados Unidos

Local de Fabricação: Bausch & Lomb Incorporated
8507 Pelham Road, Greenville, SC 29615-9598 - Estados Unidos

Importado e Distribuído por: BL Indústria Ótica Ltda.

Rua Dona Alzira, 139 – Porto Alegre – RS

CEP 91110-010 – CNPJ 27.011.022/0001-03

Registro ANVISA nº: 10196150009

Farm. Resp.: Patrícia Helena Weber - CRF-RS 11.640

SAC 0800 702 6464
sac@bausch.com
www.bausch.com.br

(B03790_RenuSensitive_packon_475mL_ca)